

TUBOS RECOLECTORES DE MUESTRA GLOBALVAC

Los tubos al vacío GLOBALVAC son empleados para transportar y procesar sangre para análisis de suero, plasma, sangre y líquidos biológicos en el Laboratorio, para realizar distintos análisis Clínicos. Son estériles y están bajo medidas industriales muy estrictas en cuanto al control de calidad.

Código	Modelo	Presentación
LC820	Tubo Vaculab, GBvac Gel T/Amarilla, 3.5ml 13x75mm	100 unidades
LC821	Tubo Vaculab, GBvac Gel T/Amarilla, 5.5ml 13x100mm	100 unidades
LC822	Tubo GBvac, EDTA T/Lila K2, 3ml 13x75mm	100 unidades
LC823	Tubo GBvac, EDTA T/Lila K3, 4ml 13x75mm	100 unidades
LC824	Tubo GBvac, EDTA T/Lila K3, 6ml 13x100mm	100 unidades
LC825	Tubo GBvac, act.coag T/Roja, 4ml 13x75mm	100 unidades
LC826	Tubo GBvac, act.coag T/Roja, 10ml 16x100mm	100 unidades
LC827	Tubo GBvac, Floruro/EDTA T/Gris, 4ml 13x75mm	100 unidades
LC828	Tubo GBvac, Floruro/EDTA T/Gris, 2ml 13x75mm	100 unidades
LC829	Tubo GBvac, H/Litio T/Verde, 3ml 13x75mm	100 unidades
LC830	Tubo Vaculab GBvac T/Celeste, 0.9ml 13x75mm	100 unidades
LC831	Tubo Vaculab GBvac T/Celeste, 2.7ml 13x75mm	100 unidades
LC832	Tubo Vaculab GBvac T/Celeste, 3.6 ml 13x75mm	100 unidades

- Material: Polietileno (PET).
- Norma de fabricación: ISO 13485:2016
- Certificaciones: CE, TUV
- Fabricación: China
- Ideales para uso de sistema multipunción

(LC820-821) TUBO AMARILLO GEL SEPARADOR

Este tipo de tubo contiene un gel inerte que después de la centrifugación se instala entre el suero y las células sanguíneas, generando una barrera física y química entre las fracciones. Ciertos analitos como la glucosa, el fósforo y el potasio se alteran rápidamente en ausencia de esta barrera.

- Mejor calidad de la muestra
- Optimización del flujo de trabajo
- No requiere tubo secundario
- Homogenización: 6 inversiones completas
- Almacenamiento: T° Ambiente y lugar seco
- Esterilización: Radiación
- Aplicación Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas
- Centrifugación 3500-3800 rpm 5 min



(LC822-823-824) TUBO HEMATOLOGIA EDTA

El EDTA (etilendiaminotetraacetato) liofilizado se emplea como anticoagulante en las muestras de sangre para test de hematología. El EDTA se asocia formando complejos con el calcio, lo que inhibe la cascada de la coagulación. La concentración de EDTA es de 1.8 mg/ml de sangre.



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: T° Ambiente y lugar seco
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación: Hematología, Morfología sanguínea, Inmunoematología, Serología

GlobalRoll®

(LC825-826) TUBO **ACTIVADOR DE LA COAGULACION**

La superficie interna de este tubo contiene polvo de sílice, que actúa como activador de la coagulación.

- **Material:** Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- **Almacenamiento:** Temperatura ambiente y lugar seco.
- **Esterilización:** Radiación
- **Aplicación Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas**



(LC827-828) TUBO **GLUCOSA EDTA – FLORURO DE SODIO**

Los valores de glucosa en muestras de sangre sin conservante decrecen rápidamente tras la extracción, ya que la glucosa va siendo metabolizada por las células sanguíneas. El Fluoruro es el aditivo encargado de detener la actividad de la ruta metabólica de la glucólisis.



- **Homogenización:** 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- **Material:** Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- **Almacenamiento:** Temperatura ambiente y lugar seco
- **Esterilización:** Radiación gamma
- **Aplicación Glucosa y Lactato**



(LC829) TUBO HEPARINA

Proporciona un plasma limpio y de calidad de forma rápida donde crea una barrera estable que separa el plasma de las células, permitiendo ser utilizado como tubo primario.

- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: Temperatura ambiente y lugar seco
- Esterilización: Radiación Aplicación: Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas y protocolos de Urgencia



(LC830-831) TUBO COAGULACION CITRATO DE SODIO

El citrato de sodio se emplea como anticoagulante para el análisis de la coagulación. El mecanismo de acción funciona formando complejos con iones metálicos como el calcio, lo que causa la inhibición de la cascada de la coagulación. Los tubos Vaculab contienen una solución de citrato trisódico al 3.2% (0.109M) La relación adecuada de sangre y aditivo es 9:1



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con doble pared internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: Temperatura ambiente y lugar seco.
- Esterilización: Radiación
- Aplicación Coagulación.

